


2019

ICB ROTATOR

Rotor de Plaquetas

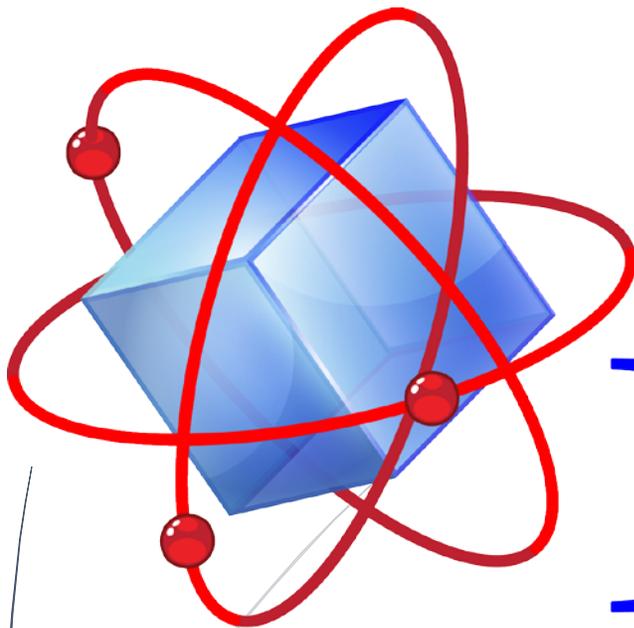

ICB

Manual de Rotor de Plaquetas

1. Conecte el enchufe a la fuente de alimentación.
2. Antes de cargar las bolsas de sangre en la canasta, deje que la puerta de la canasta mire hacia arriba. Si la puerta no está hacia arriba prenda el rotor y deje que la canasta gire hasta llegar a la posición deseada, después apague el rotor y coloque las bolsas en el interior de la canasta.
3. Cierre la puerta y accione el interruptor de energía.
4. Gire la perilla de control de velocidad para ajustar a la velocidad deseada, al mismo tiempo vera la velocidad en el tacómetro.
5. Después de finalizar su trabajo por favor apague el interruptor de energía y descargue las bolsas de sangre.



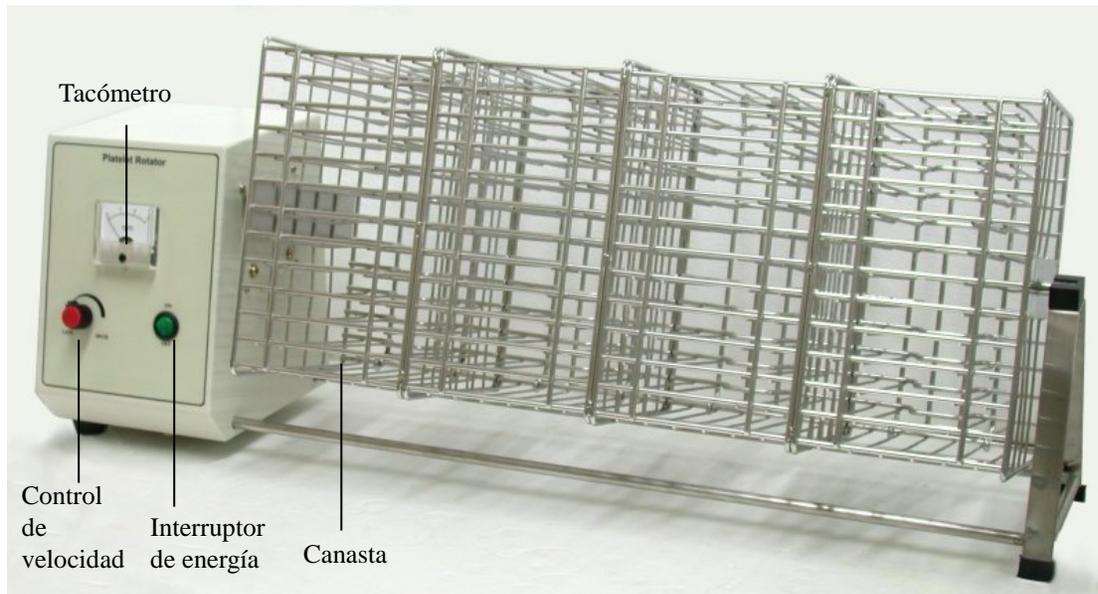


Diagrama de Circuito

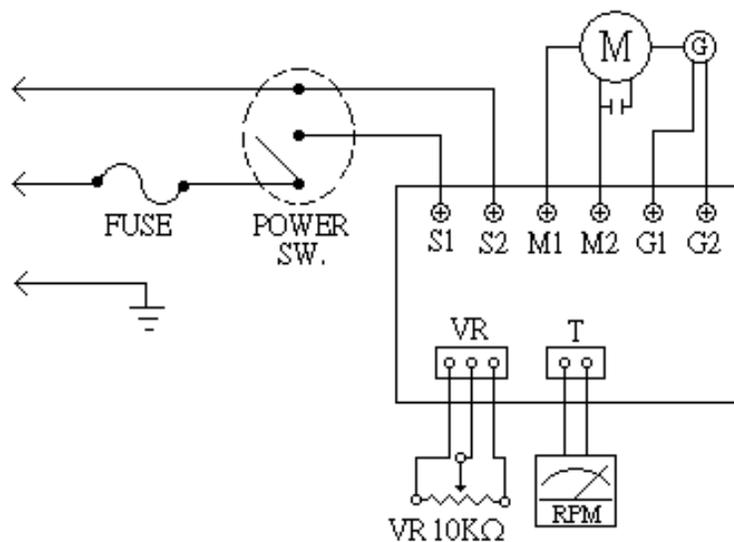

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
Instrumento inoperativo	Cable de alimentación desconectado de la toma de corriente	Conéctelo a la toma de corriente
	Potencia de salida muerta	Conéctelo a una toma de corriente diferente
	Fusible quemado (no iluminado)	Cambie el fusible
No gira la canasta	Motor dañado	Contacte a su proveedor para reparación o cambio del motor
	El conector entre el motor y la canasta no se conecta bien	Contacte a su distribuidor para su reparación
La velocidad no se puede controlar	La tarjeta madre está dañada	Contacte a su proveedor para reparación o cambio de la tarjeta
	Perilla de control de velocidad está rota	Contacte a su proveedor para reemplazar la perilla
El tacómetro no es exacto	El tacómetro está roto	Contacte a su proveedor para reemplazar el tacómetro
	Perilla de control de velocidad está rota	Contacte a su proveedor para reemplazar la perilla

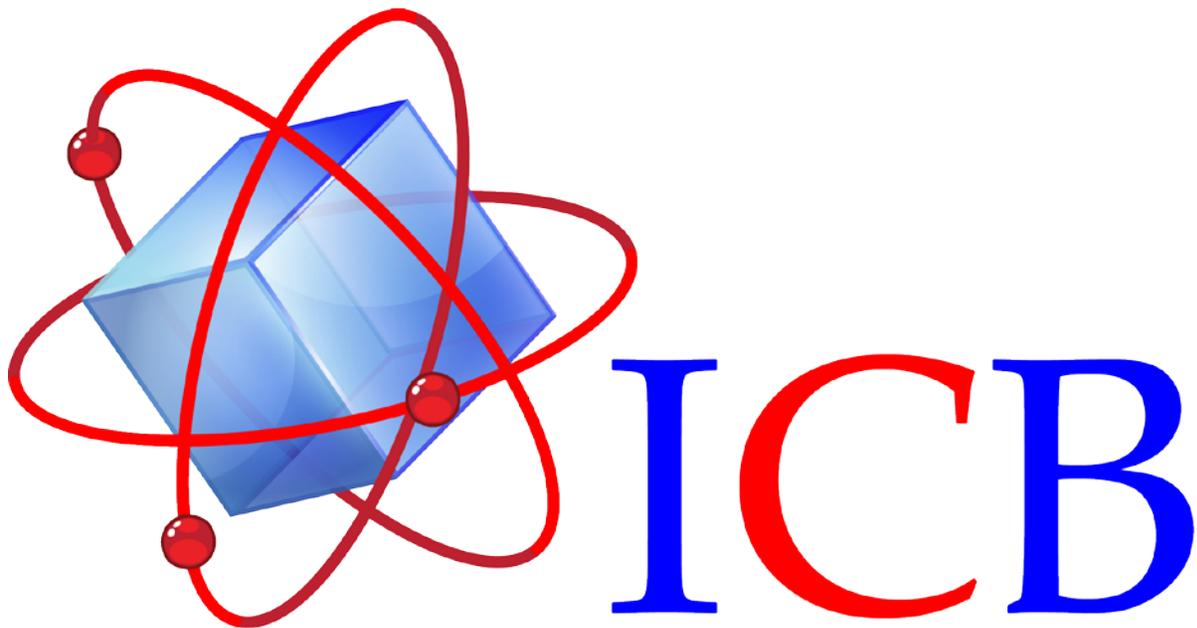

Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V.
Volcán Paricutín # 5103, El Colli 1ª. Sección, Zapopan, Jalisco 45070

Contacto:
Conmutador (33)36288333
Visite nuestra página web www.icb-mx.com
E-mail info@icb-mx.com